

Cubitus baby



www.begravningsprodukter.se

Hur används *Cubitus baby* i vården?

Cubitus baby är framtagen för att föräldrar och andra anhöriga skall få möjlighet att vara med barnet så länge som de önskar innan begravningen. *Cubitus baby* skall endast användas när föräldrarna eller andra anhöriga inte har barnet i famnen. Hjälpmidlet ersätter kylrum och kylskåp och används då föräldrarna inte har behov av nära kontakt med barnet. När barnet inte ligger i *Cubitus baby* behålls kylan bättre om locket är stängt.

Var observant på att föräldrarna förstår att barnet inte "måste" ligga i *Cubitus baby* och att de är fria att ta upp sitt barn när de så önskar. Det är viktigt att kylpåsarna byts ut utifrån behov. *Cubitus baby* får inte stängas med barn i utan att kylpåsarna är på plats. Observera att kylpåsarna skall vara kalla och bytas två till tre gånger per dygn.

För dem som vill ta hem sitt barn kan *Cubitus baby* användas med öppet eller stängt lock för transport. Om föräldrarna hellre vill använda ett babyskydd vid hemresan kan *Cubitus baby* tas med för att användas så länge som föräldrarna önskar att stanna hemma. Dubbel uppsättning av kylpåsar behövs om de stannar hemma mer än 12 timmar. Extra kylpåsar, art.nr 10385F, kan beställas på Begravningsprodukter.se. Ha gärna extra kylpåsar i frysen.

Cubitus baby fungerar bäst om alla kylfack används. Man kan även lägga extra kylpåsar under madrassen. En termometer inuti *Cubitus baby* hjälper att hålla koll på temperaturen men oftast räcker det att känna med handen om det är tillräckligt kallt eller om det är dags att byta kylpåsar.

Cubitus är latin och betyder vilorum. *Cubitus baby* kan beskrivas som en plats att vila i ombonad miljö. Tanken är att föräldrarna skall ges tid att utöva sitt moderskap och faderskap innan de begraver sitt efterlängtnade barn.

Cubitus baby är godkänd för kremering. Vid kremering skall *Cubitus baby* placeras i ett ytteremballage av vitlaserat skivmaterial. Denna kan beställas från Begravningsprodukter.se och har artikelnummer 10384.



Stommen i *Cubitus baby* är klädd med avtagningsbart laminerat/vadderat bomullstyg, insidan har åtta fickor där kylpåsarna placeras. Insidan på *Cubitus baby* täcks med bomullsöverdrag som fästs med kardborreband i varje hörn.



Kylpåsarna byts utan att påverka barnet, genom att lägga på innertyget. Med öppet lock bör kylpåsarna bytas cirka två till tre gånger per dygn för att hålla en temperatur omkring 5-10 grader inuti *Cubitus baby*.

En uppsättning om 8 kylpås i *Cubitus baby* och en uppsättning om 8 kylpås (tillbehör) i frysen gör att temperaturen i *Cubitus baby* under dygnet kan hållas under 10 grader.



Barnet kan tas hem i *Cubitus baby*. Med en extra uppsättning kylpåsar kan föräldrarna hålla barnet kallt den tid de vill stanna hemma.



Cubitus baby kan vid begravningsceremoni användas som kista. *Cubitus baby* är godkänd för kremation. Ytteremballage, art.nr 10384, skall då användas. Denna och andra tillbehör finns att beställa på: www.begravningsprodukter.se

Begravningsprodukter.se

Midfalegatan 6, Box 763, 521 22 Falköping
0515-19800 – order@begravningsprodukter.se